

# Predictor® Express

Γρήγορο  
αποτέλεσμα σε 1 λεπτό  
από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου

Το **ΝΕΟ** τεστ Predictor® Express έχει τέτοια ευαισθησία που μπορεί να σας απαντήσει εάν είστε έγκυος ή όχι σε **1 μόνο λεπτό**, από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου ή από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης και έπειτα. Τώρα η πιο αγωνιώδης σας ερώτηση μπορεί να απαντηθεί άμεσα! Προτού κάνετε το τεστ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΤΕΣΤ;

Χρησιμοποιώντας το Predictor® Express μπορείτε να κάνετε το τεστ ελέγχου κυήσεως από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου ή από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης και έπειτα.



Εργαστηριακές μελέτες έχουν υποδείξει ότι το Predictor® Express έχει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.

Αφού διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και όταν είστε έτοιμη να κάνετε το τεστ, βγάλτε το από την αλουμινένια συσκευασία και αφαιρέστε το ροζ κάλυμμα.



### ΒΗΜΑ 1 ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ

1. Διενέργεια του τεστ στη ροή των ούρων



5 sec

Κρατώντας το τεστ κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να έχει κατεύθυνση προς τα κάτω, τοποθετήστε το στη ροή των ούρων για **5 μόνο δευτερόλεπτα**.

2. Η συλλέξτε δείγμα των ούρων σας σε ένα καθαρό και στεγνό περιέκτη



20 sec

Βυθίστε ολόκληρο το απορροφητικό άκρο στα ούρα για **20 μόνο δευτερόλεπτα**.

Καθόλη τη διάρκεια διενέργειας του τεστ μην κρατάτε ποτέ τη συσκευή κατά τρόπο ώστε το απορροφητικό άκρο να έχει κατεύθυνση προς τα επάνω.



### ΒΗΜΑ 2 ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 1 ΛΕΠΤΟ

Τοποθετήστε το κάλυμμα στο τεστ και αφήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια, έτοιμη ώστε το παράθυρο αποτελέσματος να είναι προς τα επάνω.



Περιμένετε **1 λεπτό** προτού διαβάσετε το αποτέλεσμα.

### ΒΗΜΑ 3 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

#### ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ



Στο παράθυρο αποτελέσματος εμφανίζονται δύο ροζ γραμμές.  
**Είναι πιθανό η μια γραμμή να είναι αρκετά πιο αχνή από την άλλη.** Άκομα και στην περίπτωση αυτή, το αποτέλεσμα είναι θετικό.

#### ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΕΓΚΥΟΣ



Στο παράθυρο αποτελέσματος εμφανίζεται μια ροζ γραμμή.

Θα πρέπει πάντα να είναι ορατή τουλάχιστον μια γραμμή. Εάν δεν εμφανίζονται καθόλου γραμμές, σημαίνει ότι το τεστ δεν λειτουργήσει σωστά και συνεπώς το αποτέλεσμα δεν είναι έγκυο. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το απορροφητικό άκρο δεν εμποτίστηκε επαρκώς από ούρα. Επαναλάβετε το τεστ χρησιμοποιώντας μια νέα συσκευή και ακόλουθωντας προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

**Το αποτέλεσμα πρέπει να ερμηνεύεται το συντομότερο δυνατό μετά το χρόνο αναμονής του 1 λεπτού. Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά το πέρας 10 λεπτών.**



## ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

### Πώς λειτουργεί το Predictor® Express;

Το Predictor® Express μετρά την ποσότητα της ορμόνης της εγκυμοσύνης, η οποία ονομάζεται ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροπίνη (hCG) και βρίσκεται στα ούρα των γυναικών που κυοφορούν. Η εν λόγω ορμόνη, η οποία παράγεται κατά την εγκυμοσύνη, εκκρίνεται από τον πλακούντα αμέσως μετά την εμύτευση και αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό κατά τα πρώτα στάδια της κύησης. Επειδή το Predictor® Express ανιχνεύει πολλαπλές μορφές της ορμόνης της εγκυμοσύνης, είναι πολύ ακριβές στον προσδιορισμό της κύησης.

### Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω το Predictor® Express;

Χρησιμοποιώντας το Predictor® Express μπορείτε να κάνετε το τεστ ελέγχου κυήσεως από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας ή από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης της περιόδου σας και έπειτα. Το Predictor® Express μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπουδήποτε ώρα της ημέρας. Η υπερβολική κατανάλωση υγρών πριν το τεστ μπορεί να προκαλέσει αραίωση της ορμόνης της εγκυμοσύνης, γι' αυτό καταναλώστε φυσιολογικές ποσότητες υγρών πριν το τεστ κάνετε το τεστ.

### Πόσο ακριβές είναι το τεστ;

Έργα στηριζόμενα μελέτες έχουν υποδείξει ότι το Predictor® Express έχει ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου.

### Πότε πρέπει να ερμηνεύσω το αποτέλεσμα;

Το αποτέλεσμα του τεστ πρέπει να ερμηνεύεται το συντομότερο δυνατό μετά το χρόνο αναμονής του 1 λεπτού. Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα μετά το πέρας 10 λεπτών.

### Τι πρέπει να κάνω εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό (είμαι έγκυος);

Το θετικό αποτέλεσμα (εγκυμοσύνη) σημαίνει ότι ανιχνεύθηκε η ορμόνη της εγκυμοσύνης (hCG), η οποία, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλώνει την ύπαρξη εγκυμοσύνης. Θα πρέπει να επικεφαλήσετε τον ιατρό σας προκεμένου να επιβεβαιώσει ότι είστε έγκυος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, αλλά πιστεύετε ότι δεν είστε έγκυος, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

### Τι πρέπει να κάνω εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό (δεν είμαι έγκυος);

Μπορεί να μην είστε έγκυος ή μπορεί τα επίτεδα της ορμόνης hCG να μην είναι αρκετά υψηλά ώστε να είναι ανιχνεύομα από το τεστ. Ενδέχεται επίσης να μην έχετε υπολογίσει σωστά την ημερομηνία που περιμένετε την περίοδο σας. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό αλλά πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος, επαναλάβετε χρησιμοποιώντας ένα άλλο τεστ Predictor® Express κατά τις επόμενες ημέρες. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και η περίοδος σας δεν έχει έρθει ακόμα, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

### Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, μπορώ να κρατήσω το τεστ σαν ενθύμιο;

Η θετική ένδειξη δεν μεταλλάσσεται και εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να φυλάξετε το τεστ με το θετικό αποτέλεσμα για να το δείξετε στους αγαπημένους σας ή ακόμα για να το τοποθετήσετε στο πρώτο άλμπουμ του μωρού σας.

### Μπορεί το αποτέλεσμα να επηρεαστεί από τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων;

Μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που περιέχουν ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροπίνη (hCG), δηλαδή την ορμόνη της εγκυμοσύνης, δύνανται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Άλλα φάρμακα γονιμότητας (όπως το Clomid), τα αντιβιοτικά, τα αλοκόλ, τα αναλγητικά ή τα αντιαυλητικά χάπια δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα.

### Έχετε άλλες ερωτήσεις;

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση [www.Predictor.eu/gr](http://www.Predictor.eu/gr)

Predictor®

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PREDICTOR®

Το Predictor®, ο οποίο κυκλοφόρησε στο εμπόριο το 1971, ανεδείχθη ως το πρώτο τεστ εγκυμοσύνης οικιακής χρήσης παγκοσμίως. Αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη προσφέροντας οικονομικά προστές και ξύπιστες λύσεις που συντελούν στην επίτευξη της απόκτησης ενός υγιούς παιδιού με φυσικό τρόπο.

### Η ΣΕΙΡΑ PREDICTOR® ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Predictor® Express: Το Predictor® Express, όντας πολύ γρήγορο στη λειτουργία, σας παρέχει τη δυνατότητα να μάθετε εάν είστε έγκυος ή όχι σε 1 μόνο λεπτό από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου ή από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης.

Predictor® Early: Χάρη στην ψηλή του ευαλοθρία, το Predictor® Early σας παρέχει τη δυνατότητα να μάθετε εάν είστε έγκυος ή όχι έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης.

Predictor® Early Digital: Σας δίνει τη δυνατότητα να μάθετε εάν είστε έγκυος ή όχι, παρέχοντας το αποτέλεσμα με ένα αλάθαστο YES/NO. Όντας ιδιαίτερα ευαλοθρία, το Predictor® Early Digital μπορεί να ανιχνεύσει την ορμόνη της εγκυμοσύνης έως και 5 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης της περιόδου σας.

Predictor® Early + Express: Η συσκευασία περιέχει 1 Predictor® Early για να ελέγχετε την πιθανότητα εγκυμοσύνης έως και 6 ημέρες νωρίτερα από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης + 1 Predictor® Express για να επιβεβαιώσετε το αποτέλεσμα σε 1 μόνο λεπτό από την ημέρα της αναμενόμενης περιόδου σας.

Predictor® Ovulation test: Βοηθά στη μεγιστοποίηση της πιθανότητας επιτεύχσης κύρσης με φυσικό τρόπο, υποδεικνύοντας τις 2 πιο γόνιμες ημέρες του κύκλου σας.

Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξεως που αναγράφεται στη βάση της συσκευασίας. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, θέρμοκρασία φύλαξης: 4-30°C. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται στην κατάμυη, ούτε να φυλάσσεται σε θέρμοκρασία άνω των 30°C. Μόνο για διαγνώστική χρήση in-vitro. Δεν επιτρέπεται η εσωτερική χρήση. Το παρόν τεστ είναι μιας χρήσεως. Τα χρησιμοποιημένα τεστ πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο απορρυμάτων και όχι εντός της λεκάνης της τουαλέτας. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία είναι ανοιγμένη ή κατεστραμμένη.

Church & Dwight Co., Inc., Ewing, NJ 08628, USA. E.U. representative: Church & Dwight UK Ltd., Folkestone, Kent, England.

Διανέμεται από την: OMEGA PHARMA HELLAS AE, 19ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, τκ 146 71 N. Ερυθρά

Τηλ. 2108188900 [www.omega-pharma.gr](http://www.omega-pharma.gr) email: [contact@omega-pharma.gr](mailto:contact@omega-pharma.gr) Διανέμεται στην Κύπρο από: C.A. Papaellinas Ltd Tel: 0035722741741

UF074258

CE 0086

